

BOViFLAG  TM

ADESIVO AUXILIAR NA DETECÇÃO DE CIO



BOViFLAGTM

MELHORA A **QUALIDADE DA OBSERVAÇÃO DO CIO** INCREMENTANDO AS TAXAS DE SERVIÇO E CONCEPÇÃO

LEITE

1 Facilita a identificação de cio, com observações diárias. Pode ser aplicado após o **PEV** (Período Espera Voluntário) melhorando a Taxa de Serviço.

2 Permite direcionar sêmen de maior valor ou sexado nas vacas que apresentaram cio no protocolo. Aquelas vacas que não manifestaram cio, podem utilizar sêmen de menor valor ou serem re-protocoladas melhorando a Taxa de Concepção.

3 Aplicado 15 dias após a inseminação artificial do protocolo, aumenta as taxas de serviço das vacas que retornam ao cio.

4 Excelente para determinar a eficiência do protocolo reprodutivo aferindo de forma mais segura o percentual de vacas que estão apresentando cio, impactando no sucesso reprodutivo.

5 Pode ser usado após a aplicação de prostaglandina (Pre-synch ou na presença de corpo lúteo) auxiliando na detecção de cio.



CORTE

1 Identifica as fêmeas que deram cio no protocolo reprodutivo, assim usamos Sexcel® nas que apresentaram cio e sêmen convencional (opção de Fertility) nas que não apresentaram e utilização de fármaco indutor de ovulação (GNRH).

2 Utilizar boviflag no momento da sincronização das receptoras e implantar embriões apenas nas que estiverem com dispositivo raspado no dia da transferência de embriões.

3 Utilizar em todo lote no momento da retirada do implante. Aquelas que não apresentarem o dispositivo raspado podem ser inseminadas 48 horas após retirada do implante, junto de uma dose de GNRH. As receptoras que apresentarem o dispositivo marcado, seguem para transferência de embriões (normalmente 9 dias após a retirada do implante). Dessa maneira 100% do lote estará em serviço.

4 Utilizar em todo lote 10 dias pós IATF, observar os animais que raspam o dispositivo no cio de retorno (19 a 22 dias pós IATF) e implantar embriões nas mesmas 28 dias pós IATF.

5 Utilizar em todo lote 10 dias pós IATF, observar os animais que raspam o dispositivo no cio de retorno e realizar IA, com isso realizamos 2 serviços em 30 dias diminuindo a estação de monta.

FERRAMENTA PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA REPRODUTIVA DO SEU REBANHO

Adesivo para auxiliar na detecção de cio.



NATIVA

LOCAL DE APLICAÇÃO

O adesivo Boviflag deve ser aplicado pouco acima da base da cauda.

PREPARAÇÃO DO LOCAL

Limpe o local da aplicação utilizando o pano absorvente disponível no pacote Boviflag para a melhor fixação do adesivo.

APLICAÇÃO

Aplique no local indicado acima e pressione firmemente para garantir a fixação.

COMO FUNCIONA O BOVIFLAG

O Boviflag é colado entre a garupa e a base da cauda.

O adesivo prateado é raspado cada vez que a vaca é montada.

Quando a vaca é montada várias vezes o adesivo apresenta uma grande parte raspada indicando o cio da vaca.

Antes da utilização, confira as instruções do fornecedor disponível junto do produto.

abspecplan.com.br | (34) 3319-5400     @ABSpecplan

Progresso Genético Gerando Lucro

